

MEDIROYAL MALLET SPLINT -SORMILASTA



10,00 € – 52,00 €

Tuotetta saatavilla yhden kappaleen ja kymmenen kappaleen paketissa. Tilauksen hinta päivittyy, kun valitset tuotteen koon ja paketin koon.

Lasta voidaan kiinnittää käyttämällä ihoystävällistä joustamatonta teippiä tai [NRX® Strap Plus- nauhalla](#), joka kiinnitetään lastan dorsaalipuoleen kiinnitettävällä, itsekiinnittyvällä, koukkutarralla.

Käyttöaiheet:

- DIP-nivelen immobilisointi
- Sormivammat, erityisesti mallet finger (vasarasormi)

SKU: 092005

Tuote: DIP-niveltä immobilisoiva tuki

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy sormen viimeisen nivelen (DIP-nivelen) ympärysmitan mukaan. Saatavilla yksittäispakattuna tai kymmenen kappaleen paketissa.

Koko	Sormen ympärysmitta	Lastan pituus
1	40-45 mm	50 mm
2	45-50 mm	53 mm
3	50-55 mm	57 mm
4	55-60 mm	60 mm
5	60-65 mm	58 mm
5,5	65-70 mm	61 mm
6	70-80 mm	61 mm
7	80-90 mm	63 mm

Lisätiedot:**Edut ja ominaisuudet:**

- Pitää DIP-nivelen ojennettuna
- Lastan aukot lisäävät hengittävyttä lastan molemmilla puolilla
- Lastaa voidaan tarvittaessa lyhentää saksilla
 - PIP-nivelen liikerata ei rajoitu
- Väri: beige

Tuotemerkki: Mediroyal**Myymälähinta:** 10**Toimitusaika:** varastotuote**KUVAT**

