

PLANTAARIFASKIITTISUKKA, PR



35,00 €

- Plantaarifaskiitti
- Luupiikki
- Rasvapatjan madaltumisesta aiheutuva kipu

SKU: 09PF8

Tuote: Sukat plantaarifaskiitin hoitoon

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
09PF8-S	S	35-39
09PF8-M	M	40-43
09PF8-L	L	44-46



Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Eri kompressiovyöhykkeet vähentävät rasitukset jalan plantaarialueelta
- Tukee jalkapohjan holvikaarta
- Vähentää turvotusta
- Parantaa verenkiertoa ja edistää paranemista
- Valmistettu huipputeknisestä materiaalista
 - 60% polyamidia
 - 20% nailonia
 - 20% elastaania
- Tukea voi käyttää päivisin ja öisin
 - Yökäyttöä suositellaan ainoastaan, kun sukka on ollut käytössä vähintään viikon ajan
- Hoito-ohjeet: Tuki suositellaan pesemään kerran viikossa 40 asteessa koneessa

Käyttöohjeet:

- Vedä tuki jalkaasi kuin sukka. Apuna voit käyttää [Malleoforce donning aid](#) -apuvälinettä
- Pukemisen jälkeen sukan kokomerkin pitäisi olla jalkapohjan alla
- Kantapään ympärillä ja jalkapohjan alla olevalla alueella on vahvempi kompressioalue, joka tukee kantapäätä
- Riisuessa liu'uta tuki pois kuin sukka (tuki kääntyy nurin päin)
- Älä säilytä sukkaa nurin päin

Myymälähinta: 35

Toimitusaika: varastotuote