

## TONUS 406 - ANTISPASTILASTA ROTAATIOILLA



~~206,00 €~~  
**185,40 €**

- Tuote on suunniteltu vähentämään lihasjänteyttä ja tukemaan käden asentoa potilailla, joilla esiintyy aivoverenkiertohäiriön, aivohalvauksen, multipeliskleroosin, selkäydinvamman tai muun syyn aiheuttamaa liiallista lihasjänteyttä eli spastisuutta.

**SKU:** 09TON406

**Tuote:** Antispastilasta ranteen ulnaari-radialisäädöllä

### Koko- ja tilaustiedot:

TONUS-lastaa on saatavilla kolmea eri kokoa sekä vasen ja oikea puoli erikseen. Lisäksi lastaa on saatavilla kahdella erilaisella ilmatyynyllä ja kiinteällä asennolla tai säädettävänä.

Mitta määrittyy kämmenen leveydellä MCP-nivelten tasolta.

Tuotekoodi	Koko	Kämmenen leveys
09TON406-P	Lapset/geriatria	45-90 mm
09TON406-S	Standardi	90-130 mm

09TON406-X

Extra Pitkä

90 -130 mm

**Lisätiedot:****Edut ja ominaisuudet:****• Toimintaperiaate:**

- Mediroyalin Tonus-lastaa pitää käden mahdollisimman hyvässä asennossa samalla, kun sen ilmalla täytettävä tyyny ojentaa rannetta dynaamisesti juuri potilaalle sopivalla tavalla.
- Tonus-lastalla haetaan hyvän asennon lisäksi pitkäaikaista submaksimaalista venytystä ranteen ja sormien kireille fleksori-jänteille (koukistavat jänteet)
- Tonus-lastaa säädetään aina yksilöllisesti. Sopiva asento löytyy arvioimalla potilaan ranteen ja sormien maksimaalinen ojennus (ekstensio) ja säätämällä lastan asento ja ilmatyynyn täyttö niin, että tuki luo käyttökuntoon asennettuna ranteen ja sormien fleksoreille kevyen jatkuvan venytyksen.
  - Huomaa että maksimaalinen ojennus ja venytys yleensä pahentaa spastisuutta, joten hae potilaalle paras, submaksimaalinen venytysasento
- TONUS 406 mallissa on mahdollisuus säätää myös ranteen asento ulnaari- ja radiaalideviaatiosuunnassa
- Tonus-lastan runko on alumiinia ja se on helppo muotoilla/taivuttaa pöydän reunaa vasten
- Kämmentä vasten tuleva ilmatyyny tukee rystysiä eli sormien tyviniveliä hyvään asentoon ja samalla ojentaa hellästi sormien keski- ja kärkiniveliä.
- Tonus-lastaa puetaan päälle ilmatyyny tyhjänä. Kun tuki on hyvin paikallaan, ilmatyynyä täytetään 2-3 pumppauksella mukana tulevan pumpun avulla
- Lue lisää [käyttöohjeista](#).

**• Käyttöaika:**

- Paras vaikutus saavutetaan, kun lastaa käytetään 1-2 tuntia kerrallaan. Käyttöaika on parempi jakaa 1-2 tunnin jaksoihin 2-3 kertaa päivässä kuin käyttää lastaa yhtäjaksoisesti 4-6 tunnin ajan.
- Lastan koko vaikutus näkyy 3-6 kuukauden jatkuvan käytön jälkeen.
- Yritä sovittaa käyttö potilaan normaaliin päivärytmiin, esimerkiksi aterioiden ja muiden päivittäisten toimien väliin. Tonus-lastaa sopii erityisen hyvin käytettäväksi silloin, kun potilas tekee jotakin, joka yleensä lisää spastisuutta, kuten kävelyharjoitteiden aikana.

**• Vaikutus:**

- Tonus-lastan teho perustuu koukistajajänteiden jatkuvaan, tasaiseen venytykseen ja sitä kautta saavutettavaan, spastisuutta alentavaan, refleksikaaren yliherkkyyden vähenemiseen. Jatkuvan 3-6 kuukauden hoidon jälkeen keho ei enää reagoi yhtä helposti spastisuutta aiheuttaviin ärsykkeisiin.
- Samalla Tonus-lastaa pitää käden oikeassa asennossa ylläpitäen sen passiivista liikerataa ja estää paineen tunnetta.

**• Ominaisuuksia:**

- Tonus 406 -mallissa on rotaatioadapteri, jolla on mahdollista säätää ranteen asento

optimaaliseksi myös ulnaari- ja radiaalideviaatiosuunnassa (kuva 2)

- Hyvin pehmustettu runko
- Ilmatyynyn malli takaa hyvän peukalo-otteen (kuva 4)
- Päällinen on hengittävä, kosteutta säätelevä ja painetta tasaava
- Päällinen on konepestävä 60 asteessa

TONUS-käsilastaan on saatavilla myös lisäosia, kuten [sormierottelija](#). TONUS-käsilastaan on myös helppo lisätä yksilöllisiä ominaisuuksia [NRX Strapin](#) avulla.

**Tuotemerkki:** Mediroyal

**Myymälähinta:** 206

**Toimitusaika:** varastotuote

## KUVAT

