

VACOACHILL -AKILLESORTTOOSI



546,00 €

VACOped tyhjiöortoosi on myös **vuokrattavissa 307,50€ / 8vko.**

Käyttöaiheet:

- Akillesrepeämät – konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito
- Akillestendiniitti
- Nilkkamurtumat, kantaluun murtumat
- Kompleksit nilkan nivelsidevammat
- Metatarsaalimurtumat
- Nilkan vaikeat nyrjähdykset

SKU: 42VPED-01-4

Tuote: Markkinoiden paras akillesortoosi nivelsäädöllä

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määrittyy kengän koon mukaan. Erikseen saatavilla varaosasetti.

Koko	Kengän koko
S	35-40
M	40-45
L	45-50

Lisätiedot:**Edut ja ominaisuudet:**

- VACOped ortoosi mahdollistaa akilleskuntoutujalle aikaisen painon varauksen ja kävelyä ylläpitävän liikemallin ylläpidon turvallisesti
- VACOped ortoosilla minimoidaan immobilisoinnin haitat: lihasvoiman – ja aineenvaihdonnan heikentyminen sekä hermo-lihasjärjestelmän häiriintyminen
- VACOped ortoosissa on säädettävä nilkkakulma, jota säädetään ja avataan akilleskuntoutuksen edetessä (katso [hoitoprotokolla](#))
 - Nilkkanivelen säätömahdollisuudet ovat 30° plantaarifleksioista (ojennus) 20° dorsifleksioon (koukistus), 5° välein
 - Kuntoutuksen alkuvaiheessa nilkkakulma on lukittu plantaarifleksioon
 - Nilkkakulmaa avataan progressiivisesti kahden viikon sykleissä
- Tuessa on sisäsukka, johon on integroitu mikrorakeesta koostuva tyhjiöpakkaus. Tyhjiöpakkauksen avulla ortoosi mukautuu anatomisesta jalkaan antaen täydellisen istuvuuden ja tuennan
- Jokaisen pakkauksen mukana tulee kaksi erilaista ulkopohjaa:
 - Akilleskuntoutuksen alkuun suunniteltu akillespohja
 - Akilleskuntoutuksen jälkipuoliskolle ja muihin vammoihin suunniteltu matalampi keinupohja ns. walkerpohja
- Useat kliiniset tutkimukset todistavat akillesjänteen kuntoutumisen nopeutuvan ja parantuvan merkittävästi VACOped ortoosin avulla
- Pakkauksessa on mukana kulmasäätöavain, varasisäsukka, kaksi eri ulkopohjaa ja tyhjiöpumppu
- Pitkäaikaiskäytössä tuotteeseen on ostettavissa myös vaihtopehmustesetti art. 42VPSE-01-4-x (kuva 3), johon kuuluu kaksi vaihtosisäukkaa, tyhjiöelementti, ohut ulkopohja, pisarapohja, säätöavain ja käyttöohje
- Ortoosin jalkateräosuus on säädettävissä kolmeen eri pituuteen
- Katso [asennusvideo](#)
- Katso [video tuotteen eduista](#)

Myymälähinta: 546**Saatavilla vain myymälästä:** 1**Toimitusaika:** varastotuote

KUVAT



VACOped Standard Treatment Protocol

Treatment week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VACOped										
<input type="checkbox"/> Ankle Fracture Weber A										
<input type="checkbox"/> Ankle Fracture Weber B/C/Mason-Jones										
<input type="checkbox"/> Pilon-Tibial Calcaneus Operative/Conservative										Weight bearing dependent on stay
<input type="checkbox"/> Arthrodesis Upper and lower ankle joint										Weight bearing dependent on stay
<input type="checkbox"/> Metatarsale Fracture V										
<input type="checkbox"/> Upper Ankle Joint Replacement										
<input type="checkbox"/> Bone-Corridor Transplantation DC-FACE										
<input type="checkbox"/> Achilles tendon percutaneous/open suture										
<input type="checkbox"/> Achilles tendon conservative										
VACOpedes										
<input type="checkbox"/> Metatarsale Fracture IV										
<input type="checkbox"/> Corrective osteotomy forefoot										
<input type="checkbox"/> Metatarsale Arthrodesis (Lapins)										Weight bearing dependent on stay
VACOgrids										
<input type="checkbox"/> Ligament injuries										Weight bearing dependent on stay